

ADE Elektronik Tartı Kullanımı

Gerekli kalite standartlarında üretilen M304641 tartınız medikal amaçlı kullanıma uygun değildir.

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken noktalar ve pratiklik açısından size yol gösterici olmalıdır.




Elektronik tartı,gösterge ile 2 mt boyutlarında bir kablo ile bağlantı sağlayan konumda olup gövdeli veya gövdesi kullanma şekline uygundur. Gövde size boy ölçer ekleme avantajı da sağlamaktadır.

Kurulum


Ade model tartınız, üzerine elektronik ve/veya manuel boy ölçer monte edilerek kilo ve boy ölçümü yapmanızı ve manuel ve/veya otomatik olarak BMI hesaplamanızı sağlamaktadır.

Lütfen öncelikle tartının ambalajını açınız ve ambalajın içerisinde size gönderilmiş olan tartı ve tüm aparatlarını hazırlayınız.

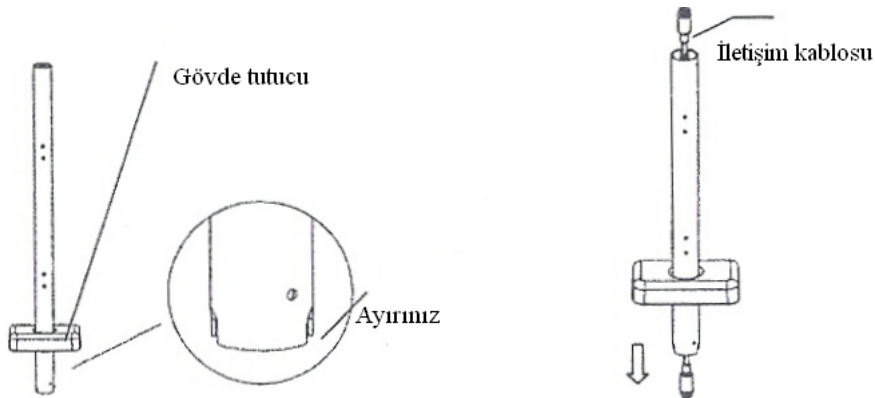


Şekilde görülen kısım alt tarafa gelecek şekilde ve gövde dik pozisyonda şekilde görüldüğü gibi gövdeyi gövde tutucu nun içerisine yerleştiriniz.


Yine şekilde görüldüğü gibi iletişim kablosunu gövdenin içerisinden aşağıya doğru uzatınız.

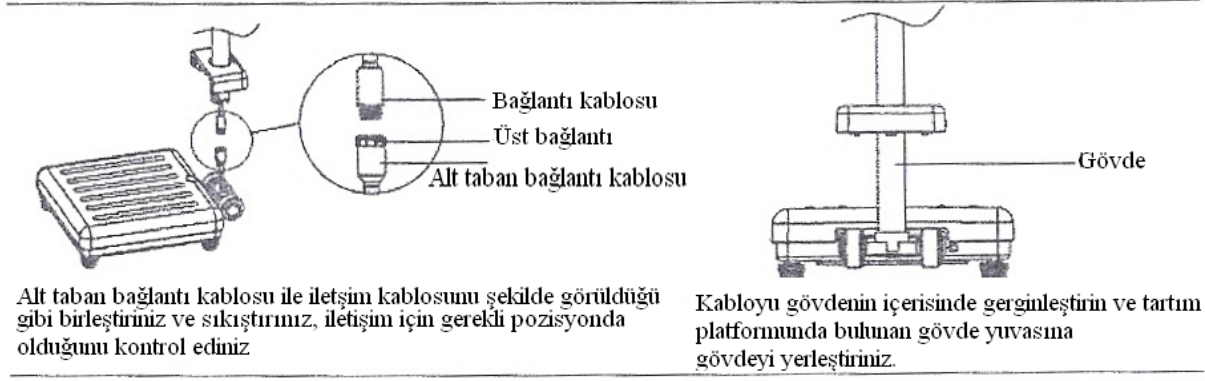


Ana üniteyi ve gövdeyi şekilde görüldüğü gibi yan yatırarak, size gönderilmiş olan vidalar vasıtası ile Ana üniteyi (tartım platformu) ve gövdeyi birbirine vidalayarak sabitleyiniz.

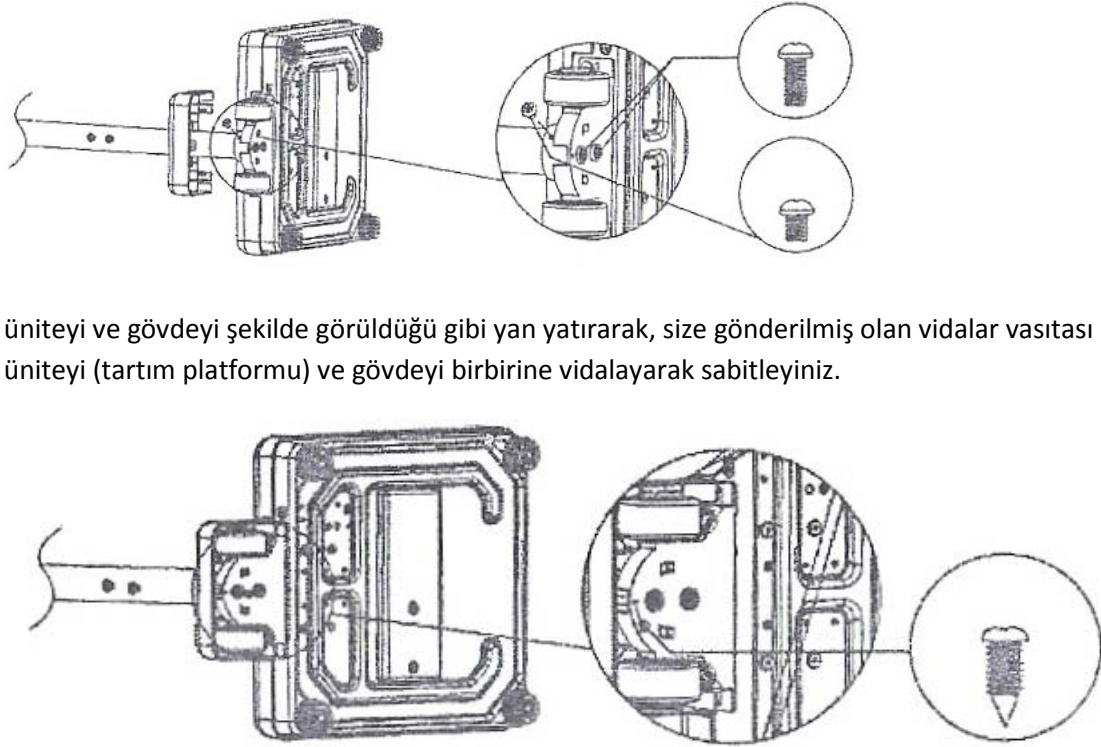

Birleştirme işlemi tamamlandıktan sonra koruma kabını alt bölüme vidalayınız.

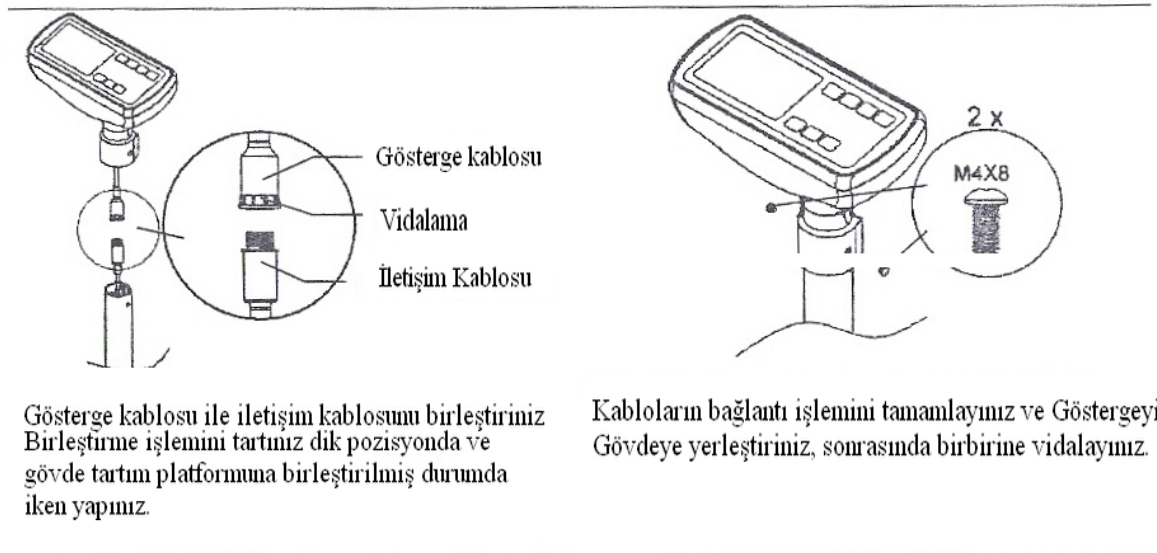

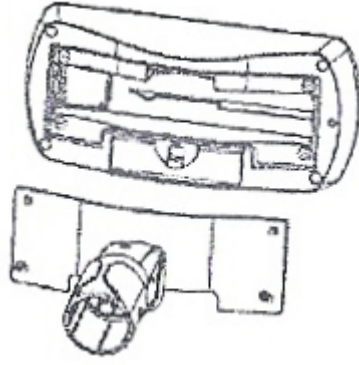


Besleme / Güç




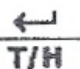
Cihazınızı 6 x 1.5V AA Alkalin pil ile veya DC adaptör ile çalıştırınız. Piller şekilde görüldüğü gibi ve göstergede belirtilen yönlere yerleştirilmelidir. Eğer cihazınızı adaptör ile çalıştıracak iseniz orijinal ADE marka adaptörü kullanınız ve adaptörü göstergedeki adaptör girişine takınız, aksi durumda garanti ve güvenlik ile ilgili tüm sorumluluklar kullanıcıya aittir.

Atık pillerin kullanımı ve dönüştürülmesi ile ilgili maksimum güvenlik önlemlerini alınız.

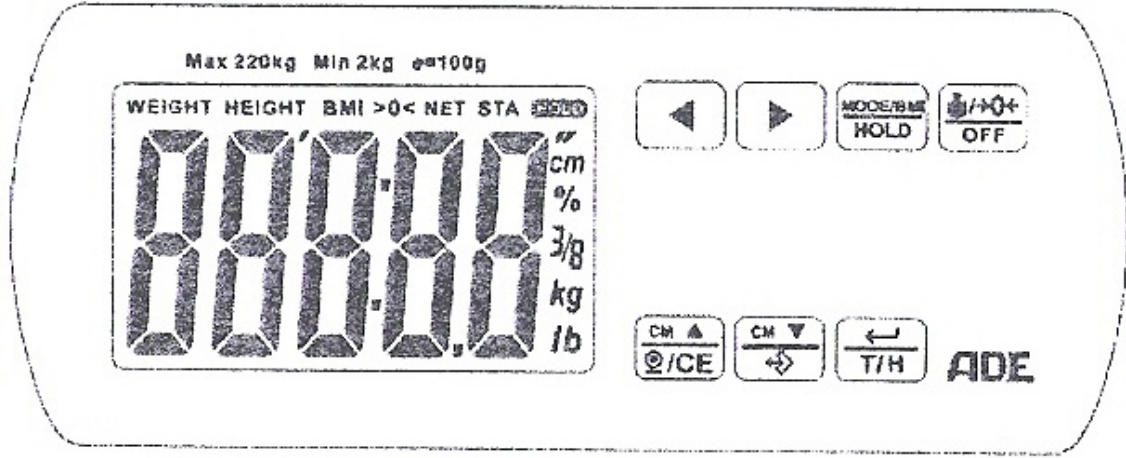GÖSTERGE



AÇIKLAMALAR

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | Weight | - Kilo tartımı modu |
| 2 | Height | - Boy ölçümü modu |
| 3 | BMI | - BMI hesaplama modu |
| 4 | >0< | - Tartı 0 lama set tuşu |
| 5 | STA | - Tartı dengede göstergesi (üzerine çıkılabilir) |
| 6 | Hold | - HOLD (ekranda sonucu tutma) tuşu aktif ise görüntülenir |
| 7 | ◀ ▶ | - Gösterge hareketlendirme tuşu |
| 8 |  | - Tartım modu; 0 lama referansını görüntüleyin; kapanış modu |
| 9 | Mode / Hold | - MODE: BMI yada hafıza modu. Kullanıcı bilgi girişi
- HOLD: Kilo girişi veya gösterim |
| 10 |  | - Açma kapama ayarı; boy ayarı ; hafıza lokasyonu ; son giriş temizleme |
| 12 |  | - Ayar değişimi ve hafıza lokasyonu değişimi |
| | | - Giriş onay butonu |
| 13 |  | - Dara fonksiyonu aktivasyonu
- Boy giriş modu |

DİKKAT!..

- Cihazlarda ölçüm yapmak için çıplak ayakla üzerine çıkılmalıdır. Cihazların platformunu her kullanımdan sonra dezenfekte ediniz. Kesinlikle platform üzerine direkt olarak sıvı dökmeyiniz, sıvıyı öncelikle beze uygulayınız. Aksi halde cihazlarda istenmeyen arızalar oluşabilir. Platformu etil alkol ve yumuşak bir bezle siliniz. Platformu güçlü kimyasallarla temizlemeyiniz.
- Platformun düzgün ve sabit bir zemine oturduğundan emin olunuz. Eğer kullanılırken platform düzgün ve sabit bir zeminde değilse ölçümde yanlışlıklar ve sapmalar meydana gelir. Herhangi bir şekilde platformun üzerine atlayarak çıkmayınız.
- Orjinal DC adaptör kullanınız.
- Elektrikte meydana gelebilecek dalgalanmalar veya yanlış adaptör kullanılması sonucunda cihazınızdaki sigorta atacaktır. Bu durumda sigortayı değiştirmesi için yetkili ile temasa geçiniz.

BAKIM

Cihazların düzgün ve çalışır biçimde size teslim edildikten sonra aşağıdaki prosedürlere dikkat ediniz,

- Cihaz uzun bir süre kapalı duracaksa cihazın fişini prizden çekiniz.
- Kısa devre riskini ortadan kaldırmak için sıvı veya metal objeleri uzak tutunuz.
- Uygun dezenfektanlarla silerek temiz tutunuz(Saf alkol veya beze uygulanan cam siliciler gibi)
- Cihazı düşürmeyiniz, yüksek titreşimli yerlerde kullanmayınız.
- Cihazı eski bulunduğu ortamdan 20°C veya daha fazla sıcaklık farkı bulunan bir yere taşıyacak olursanız, taşıma işleminden iki saat sonra cihazı çalıştırınız.

KULLANIM KOŞULLARI



- Cihazınızı kullanırken ortam sıcaklığı 0°C - 35° arasında olmalıdır.
- Cihazınızı kullanırken ortamdaki nem oranı 30% - 80% arasında olmalıdır.


SAKLAMA KOŞULLARI

- Cihazınızı kullanım dışında saklayacağınızda ortam sıcaklığının -10°C ile 50°C arasında ve ortamdaki nem oranının 10% ile 90% arasında olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınızı direk güneş ışığına maruz bırakmayınız; aşırı sıcaklık değişikliği olan mahallerden uzak tutunuz; aşırı nemli, tozlu ortamlarda bulundurmuyunuz;
- Sıcaklık veren ısı kaynaklarından ve/veya titreşimli ortamlardan ve aşırı şoktan uzak tutunuz.

Lütfen cihaz her hangibir güç kaynağından beslenirken her hangibir montaj / demontaj işlemi yapmayınız, cihaz doğrudan veya dolaylı yoldan müdahale etmeyiniz.

TARTIM İŞLEMİ

1. Lütfen  tuşuna basınız ve ekranda "0" görüntülenmesini bekleyiniz
2. Ekranda "0.0kg" görüntülenecektir, eğer ekranda bu ibare değil de yukarıya veya aşağıya doğru bir kilo görüntüleniyor ise tartı dengede değildir ve sıfırlama için  tuşuna basınız.
3. Tartının üzerine çıkınız ve kilo ölçümünü yapmasını bekleyiniz. Ekranda tartının dengede olduğunu gösterir "STA" gösterilecektir.

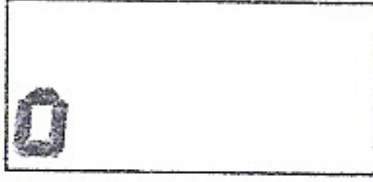

1. işlem



2. işlem




3. işlem

Kiloyu ölçümü tamamlandığında tartınız ekranda gösterdiği kiloyu sabitleyecektir, eğer hastadan ve/veya zeminden kaynaklı sebeplerden dolayı tartınız bunu yapamıyorsa "HOLD" tuşu ile ekranda gördüğünüz kilo değerini sabitleyebilirsiniz.

BOY ÖLÇME FONKSİYONU


Eğer ADE marka elektronik boy ölçeri kullanıyor iseniz bu bölümdeki açıklamaları dikkate alınız.

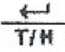1.  tuşuna basarak boy ölçüm işlemini başlatınız, bundan önce elektronik boy ölçme çubuğu tartıya monte edilmeli ve bağlantı boy ölçerin iletişim kablosu ile sağlanmalıdır.
2. Ekranda "110.00" varsayılan boy görüntülenecektir. Eğer görüntülenmiyor ve kesik çizgiler varsa, boy ölçerin tamamen kızığın içine girdiğinden ve başa gelen aparatın kapalı olduğundan emin olunuz.




görüntüleniyorsa

uygun görünüm

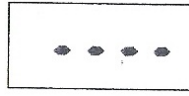

kesik çizgiler

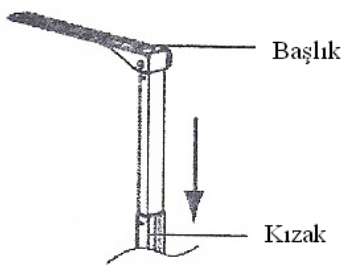

Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra, tartının


Üzerine yanda görüldüğü gibi çıkınız ve boyu ölçünüz.

Ölçümü tamamladıktan sonra aşağı ininiz ve boy ölçerinizi kapalı konuma getiriniz.



BMI ÖLÇÜMÜ

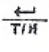

1. MODE tuşuna basınız, ekranda yandaki şekil belirlediğinde  tuşuna basınız.




2. Ekranda yanda da görülen Step işareti çıktığında tartıya çıkınız.




3. Ekranda yandaki şekil belirlediğinde aşağıdaki talimatları uygulayınız.

Eğer daha önce bahsedildiği gibi ADE marka elektronik boy ölçer tartıya monte

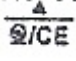edilmiş ve bağlantı kurulmuş ise boy ölçümünüz otomatik olarak ekrana yansiyacaktır. Bu halde dahi eğer Boy Bilgisini manuel olarak girmek isterseniz  tuşuna basınız ve boy bilginize ulaşmak için [▼ ▲] ve [◀ ▶] yön tuşlarını kullanınız.

Eğer tartı elektronik boy ölçerle bir iletişim halinde değilse [▼ ▲] ve [◀ ▶] yön tuşlarını kullanarak Boy Bilgisini manuel olarak belirleyiniz.

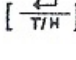Boy Bilgisini konfirme etmek için  tuşunu sabitlemek için kullanınız.

Ekranda, eğer bilgiler belirlendi ve dengelendi ise, STA gösterilmelidir ve bunun ardından Boy,Kilo ve BMI 4 sn aralıklarla 3 kez ekranda gösterilecek ve tartı otomatik olarak kapanacaktır.

PROBLEM LİSTESİ

1. Kilo görüntülenmiyor ise; tartının güç kaynağından beslendiğini teyit ediniz ve tartım işlemini tekrarlayınız.
2. Ekranda "bAtt" görüntüleniyor ise, tartıyı besleyen pil seviyesinin azaldığını gösterir.
3. Ekranda "Err 0" görüntülendi ise tartım platformunun boş olduğunu ve üzerinde bir ağırlık olmadığını kontrol edin, eğer varsa temizleyin. Halen çözülmemişse tartım işlemini tekrarlayınız.
4. Ekranda "Err 2" görüntülendi ise bu aşırı yük ikazıdır. Cihazın kapasitesinden fazla yük yüklenmiş anlamındadır ve platformu boşaltınız, aksi durumda tartıda kalıcı hasarlar yaratabilirsiniz.
5. Eğer ekranda 20 sn içerisinde kilo sabitlenmiyor ise HOLD tuşunu kullanınız.
6. Eğer ekranda "Err6" görüntülendi ise yetkili servis ile görüşünüz.
7. Eğer ekranda "uStb" görüntülendi ise platformdan aşağı ininiz ve yeniden çıkınız.
8. Eğer "Err 0" ve "Err 2" hataları halen çözülemedi ise pilleri çıkarınız ve/veya elektrik fişini prizden çekiniz ve 1 dakika bekledikten sonra güç besleme ayarlarını yeniden yapınız ve tartım işlemini tekrarlayınız.

TARTI MEDİKAL DIŞ TİCARET ve PAZARLAMA LTD ŞTİ.

0212 3271005 www.tarti.com info@tarti.com

Dikilitaş Mahallesi Karanfil Sokak No.15 Yıldız Beşiktaş İstanbul