

ADE

Elektronik Bebek Tartısı

M112600 – M114400 – M106600 – M105600 -M114600 – M107600 Modeller için

KULLANIM KILAVUZU



İTHALATÇI

ve SERVİS FİRMA

TARTI DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ.

Dikilitaş mah. Karanfil sok. Kartal Apt. no:15

Beşiktaş-İstanbul

TEL :0212 327 10 05

FAX: 0212 327 09 98

www.tarti.com

Mecidiyeköy vd 309 006 6157

ÜRETİCİ FİRMA:

ADE GMBH CO

Hammer Steindamm 27-29, D-22089 Hamburg / Germany

Phone +49 (0)40 432 776-0

Fax +49 (0)40 432 776-10

medicine@ade-germany.com www.ade-germany.com

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tartım Kapasitesi	: 20 kg
Tartım Hassasiyeti	: 5 g
Ölçüler	: 600 x 385 x 85 mm
Yaklaşık Ağırlığı	: 2.6 kg

Sağlam-güçlü yapı

Platform ve gövde toz için kaplama

Kg ve lbs ölçüm imkanı

Geniş LCD ekran

Dara ve çoklu dara fonksiyonu

Hafıza fonksiyonu ve otomatik kapanma

Adaptor ve pil ile çalışma imkanı

NA
SIL
KU
LL
ANI
LIR



1.

Tuřlar

Fonksiyonlar

ZERO.....	Sıfırlama tuřu
TARE.....	Dara tuřu
HOLD.....	Sonu sabitleme tuřu
UNIT	lm birimini deęiřtirme tuřu

Display symbols

gross.....	Kilo alındı gstergesi
tare.....	Dara deęeri alıřma gstergesi
zero.....	Manuel olarak sıfırlama gstergesi
Δ.....	Sabit-Düz zemin gstergesi
⊞.....	Pil enerji dřüklüęü

u

da Bebek Yatırma Kabı, Tartım Platformu ve adaptor bulunmaktadır.

2. Cihazın adaptoru 9V 800 mA dır. řarj edilebilir Piller cihazın anaünitesinde olup,řarj etmek için adaptoru takınız.
3. İlk řarj iřlemi 24 saat boyunca yapılmalıdır.
4. Dolu bir baterinin ömrü yaklaşık olarak 100 saattir.
5. Pillerin tekrar řarj edilmeye ihtiyacı olduęunda pil enerji dřüklüęü görüntülenir ve piller yaklaşık 10 saat řarj edilir ve řarj iřlemi cihazın kendisini otomatik olarak kapatmasına kadar devam edilir.
6. Tartıyı düz bir zemine yerleřtirin, ölçüm için tabla ve zemin düz olmalıdır.
7. Tartının dört ayaęının birden zemine tam olarak temas ettięine emin olunuz.

8. Tartının Açma tuşuna basınız ve ekranda “8888” görüntülenecektir. Kısa bir süre sonra ekranda”0.00” belirecek olup, mini tartı artık tartım işlemine hazırdır.
9. Bebeği Ölçüm Tablasına yerleştiriniz. Eğer ağırlık tartının kapasitesinden fazla ise tartı ölçümü yapmayacak olup ekranda “EEEE” görüntülenecektir.
10. Ağırlık tespit edici ile kiloyu sabitleyebilirsiniz.
11. Dara Fonksiyonu ; tartının dara tuşu tartı açıkken dara alınacak nesneyi ölçüm tablasına yerleştirin, tartı kilo ölçümünü yaptıktan sonra eğer TARE tuşuna basarsanız, tartınız bu ölçülen kiloyu dara algılar ve ekranı “0.00” belirir. Böylece daralı ölçümlerde (ambalaj,kap,örtü vb...) kullanılabilir.
12. Tare işleminden sonra darası alınan nesne ölçüm tablasında dursa da bu ölçüm tamamlandığından artık tablaya tartım için koyulacak bebeğin tartımı yapılacak ve darası alınan nesnenin ağırlığı, yeni tartım yapılan bebeğe dahil olmayacaktır. Bu tarz ölçümlerin kapasitesi tartınızın tartım kapasitesine eşittir.
13. Eğer ölçüm tamamlandıktan sonra ekranda görüntülenen ağırlık sabit bir görüntüleme şeklinde kaldıysa, tartı pil şarj ömrünü uzatmak için otomatik olarak kendini kapatacaktır.

Uyarı

Eğer dijital ekranda 0.00 görüntülenemiyorsa tartıya ölçüm kapasitesine yakın bir nesne üzerinde uzun süre bekletilmiş ve cihazınız nesne üzerinde iken açılmış olabilir bu nedenle yeniden TARE tuşuna basarak cihazınızı açınız ve tartımı tekrarlayınız.

Eğer mini tartınız uzun süre kullanılmadı ve açılmıyorsa, pillerinizi tükenmiş olabilir veyeniden şarj edilmeye ihtiyacınız olabilir. Pilleri şarj ediniz ve sorun çözülmüyorsa servisi arayınız.

Dikkat

Tartınız mutlaka dikkatli ve hassasiyet gözetilerek kullanılmalıdır ve kullanım esnasında aşağıda yer alan durumlar mutlaka gözetilmelidir;

- Asla cihazı sökmeyiniz ve tartınızın bir bölümünü/bölümlerini demonte etmeyiniz.
- Direkt güneş ışığından uzakta tutunuz ve vibrasyonlu/sallantılı olmayan düz ve sert zeminlerde kullanınız.

- **Tartının yeni ortam ve hava deęişikliklerine adaptasyonu yaklaşık 2 saat sürebilir.**
- **Tartıyı sudan ve kimyasallardan uzak tutunuz, bunun için kullanımınız dışında zaman zaman kılıf veya örtü kullanabilirsiniz.**
- **Tartının verimli çalışması için ortam sıcaklığı 10°C – 40°C derecedir. Bu nedenle bu şartların sağlandığı ve gerekli diğer ortamın olduğu durumlarda kullanınız ve tartıyı ısı kaynaklarından uzakta tutunuz.**
- **Tartıyı uzun süre kullanmayacaksanız kuru-toz olmayan ortamlarda saklayınız.**
- **Tartıyı servise gönderirken pilleri tartıdan ayırınız ve orijinal ambalajı ile birlikte tüm parça/döküman ile birlikte servise gönderiniz.**
- **Tartı kullanılmıyorken lütfen üzerinde herhangi bir obje veya nesne bırakmayınız.**

ÖNEMLİ UYARILAR....

- Tartıyı dikkatli taşıyınız, düşürmeyiniz, yere atmayınız. Taşıma sırasında tedbirli olunuz
- Tartının üzerine kapasitesinden fazla yuk koymayınız.
- Tartının temizliğini çok hafif nemli bir bez ile yapınız.
- Tartıyı doğrudan güneş ışığından koruyunuz.
- Tartınızı sulu veya tozlu ortamlarda kullanmayınız. Kullanmadığınız zamanlarda saklamak için orijinal ambalajını kullanınız
- Tartının üzerinde kesinlikle elektrik kaynağı yapmayınız.
- Tartının nakliyesi gerektiğinde orijinal ambalajını veya tartıya hasar getirmeyecek bir ambalajı kullanınız.
- Tartının ölçüm takımını kullanırken sert ve sivri cisimler kullanmayınız.