

ADE

Mekanik Bebek Tartısı

M110800 Model İindir.

KULLANIM KILAVUZU



İTHALATÇI ve SERVİS FİRMA

TARTI DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ.

Dikilitaş mah. Karanfil sok. Kartal Apt. no:15

Beşiktaş-istanbul

TEL :0212 327 10 05

FAX: 0212 327 09 98

www.tarti.com

Mecidiyeköy vd 309 006 6157

ÜRETİCİ FİRMA:

ADE GMBH CO

Hammer Steindamm 27-29, D-22089 Hamburg / Germany

Phone +49 (0)40 432 776-0

Fax +49 (0)40 432 776-10

medicine@ade-germany.com

www.ade-germany.com

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tartım Kapasitesi	: 16 kg
Tartım Hassasiyeti	: 10 g
Ölçüler	: 550 x 195 x 300 mm
Yaklaşık Ağırlığı	: 5.8 kg


Sağlam-güçlü yapı

Platform ve gövde toz için kaplama

Kilo ölçüm başlığı dökme demir

Kg ve lbs ölçüm imkanı

NASIL KULLANILIR

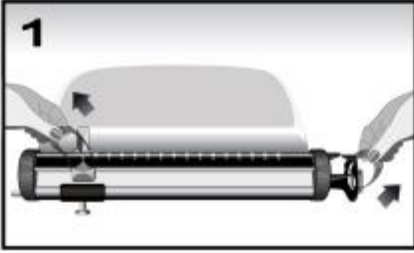




1. Tartının ambalajında Bebek Yatırma Kabı, Tartım Platformu ve Tartım Manuel Operasyon bölümü bulunmaktadır.
2. Şekilde görüldüğü gibi tartıyı monte ediniz.




Bebek yatırma kabını da tartıya monte ettikten sonra 3. resimde görüldüğü gibi klips yardımı ile kabı ve platformu birbirine monte ettikten sonra klipsleyiniz.



3. Tartıyı düz bir zemine yerleştirin, ölçüm için tabla ve zemin düz olmalıdır.
4. Tartı klasik manuel baskül formatında imal edilmiş olup, manuel kilo gösterge bölümünde bulunan kayan belirleyici aparat, yine bu bölümde bulunan denge ağızlıkları paralel olana kadar sağ-sol yöne kaydırılır.

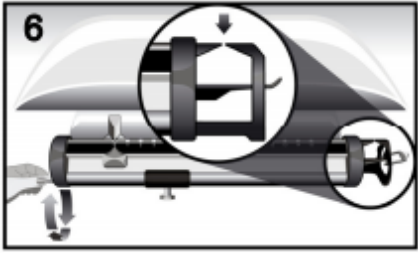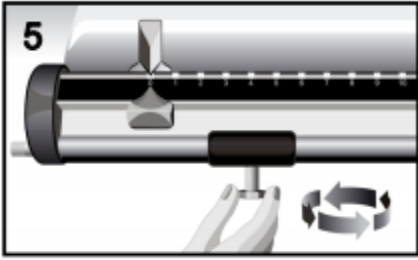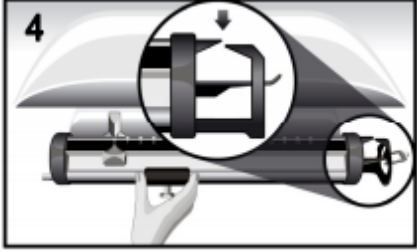

5. Ölçüm için bebeği bebek tartım tablasına koyunuz.
6. Anlatıldığı şekilde ağırlık tespit edici ile kilonuzu sabitleyiniz.

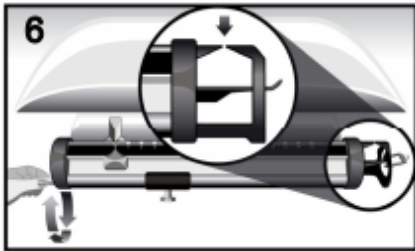

Dikkat

- **Asla cihazı sökmeyiniz ve tartınızın bir bölümünü/bölmülerini demonte etmeyiniz.**
- **Direkt güneş ışığından uzakta tutunuz ve vibrasyonlu/sallantılı olmayan düz ve sert zeminlerde kullanınız.**
- **Tartının yeni ortam ve hava değışikliklerine adaptasyonu yaklaşık 2 saat sürebilir.**
- **Tartıyı sudan ve kimyasallardan uzak tutunuz, bunun için kullanımınız dışında zaman zaman kılıf veya örtü kullanabilirsiniz.**
- **Tartı kullanılmıyorken lütfen üzerinde herhangi bir obje veya nesne bırakmayınız.**

ÖNEMLİ UYARILAR....

- Tartıyı dikkatli taşıyınız, düşürmeyiniz, yere atmayınız. Taşıma sırasında tedbirli olunuz
- Tartının uzerine kapasitesinden fazla yuk koymayınız.
- Tartının temizliğini çok hafif nemli bir bez ile yapınız.
- Tartıyı doğrudan güneş ışığından koruyunuz.
- Tartınızı sulu veya tozlu ortamlarda kullanmayınız. Kullanmadığınız zamanlarda saklamak için orijinal ambalajını kullanınız
- Tartının üzerinde kesinlikle elektrik kaynağı yapmayınız.
- Tartının nakliyesi gerektiğinde orijinal ambalajını veya tartıya hasar getirmeyecek bir ambalajı kullanınız.
- Tartının ölçüm takımını kullanırken sert ve sivri cisimler kullanmayınız.